



**M.R.M. COMERCIAL**  
Sociedad Anónima



# sapipouch *BOLSA PARA EL INSTRUMENTAL USADO*

CE  
0123



**Sapipouch** es un dispositivo médico estudiado para recoger el instrumental quirúrgico sucio, utilizado durante una intervención quirúrgica y transportarlo para su lavado y esterilización

Realizado en material plástico resistente, desechable y estéril, **Sapipouch** esta formado por un plano rígido para apoyar sobre la mesa de instrumental y de seis bolsillos que cuelgan de diferentes tamaños para contener el diverso instrumental utilizado. Estos bolsillos tienen pequeñas aberturas en el fondo para permitir recoger el exceso de líquidos en la adecuada bolsa pequeña de abajo.

**Sapipouch** proporciona una solución limpia y eficaz para minimizar el riesgo de infección por la manipulación de instrumental usado.

**Sapipouch** es ideal en los quirófanos, en urgencias y en todo aquellos ambulatorios donde se realicen pequeñas intervenciones quirúrgicas

## Intrucciones de Uso:


1. Quite la bolsa de su envase estéril.
2. Sitúe el plano rígido horizontalmente sobre la mesa, con los bolsillos colgando
3. Colocar cada pieza de instrumental utilizada en el bolsillo adecuado.
4. Después del acto quirúrgico, utilice la bolsa Sapipouch para el transporte del instrumental para su lavado y posterior esterilización.
5. Eliminar el Sapipouch con el resto del material quirúrgico desechable.

## Información para pedidos

Referencia: **A.8800**

Unidad de venta: **Caja de 18 unidades.**

Material **Estéril**

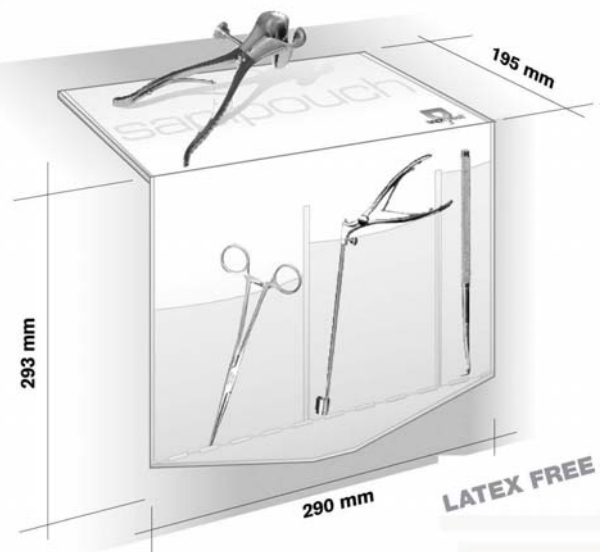

Edición: Abril/2009