



**M.R.M. COMERCIAL**  
Sociedad Anónima



# Spongy

**Esponja estéril para limpiar heridas REF.: A.75040 / A.75025 / A.72525**



El tratamiento de heridas en distintas superficies y de diferente profundidad que surgen como consecuencia de operaciones quirúrgicas es oneroso tanto para el paciente como para el sistema sanitario. Se requiere medicación frecuente durante largos períodos de tiempo, lo que supone una inversión considerable de tiempo para el equipo médico y paramédico. El uso de una esponja desechable, estéril y biocompatible de poliuretano con efecto detergente constituye un progreso sustancial en los sistemas de medicación, comparado con el vendaje de gasa.

Colocada dentro de la herida, al cabo de unas horas se empapa con los exudados. Cambiar **Spongy** cada 6-8 horas permite una evacuación frecuente del suero y de las secreciones fibrosas o purulentas, lo cual facilita la granulación del tejido reparado y permite su cura.

Se indica su uso luego de lograr una hemostasia perfecta. Ésta se alcanza vendando las heridas en el quirófano y reemplazándolas en el primer y, de ser necesario, segundo día desde la operación.

**Spongy** permite que el paciente pueda medicarse solo y en un ambiente familiar rápidamente



- Relleno de poliuretano
- Libre de látex
- Biocompatible
- Desechable y estéril

## INSTRUCCIONES DE USO

El médico debe enseñar al paciente a usar **Spongy** para medicar su herida la primera vez.

Desinfecte a fondo unas tijeras con peróxido de hidrógeno y utilícelas para cortar **Spongy** y asemejarla lo más posible a la forma de la herida. **Humedezca Spongy con solución fisiológica, estrújela para retirar el exceso de líquido y colóquela dentro de la herida** aplicando una leve presión para asegurarse que los bordes de la esponja tocan las paredes de la herida. Un vendaje con gasa mantendrá la esponja en la posición correcta hasta que se cambie unas 6-8 horas más tarde, o según recomendación médica. En las limpiezas subsecuentes el paciente puede recortar las otras esponjas de forma similar - las medidas se reducirán gradualmente - hasta que la herida esté completamente curada.

El médico puede evaluar si la medicación se está aplicando correctamente cada 7/15 días.

El uso de **Spongy** en lugar de la medicación tradicional con vendaje ofrece las siguientes ventajas:

- La esponja se puede cambiar varias veces al día, lo que mejora la limpieza de la herida.
- Los pacientes pueden medicar solos la herida, con una ventaja considerable en términos organizativos.
- Una limpieza frecuente de la herida conlleva una cicatrización y curación más rápidas.

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:

• Referencia <b>A.75040</b>	50 x 50 x 38 mm	Caja de 24 unidades
• Referencia <b>A.75025</b>	50 x 50 x 25 mm	Caja de 24 unidades
• Referencia <b>A.72525</b>	50 x 25 x 25 mm	Caja de 24 unidades



**Esterilizado mediante:** Óxido de Etileno

Edición: Marzo/2010