



**M.R.M. COMERCIAL**  
Sociedad Anónima




## MPR Dr. A. D'Elia - Dr. G. A. Santoro



### Rectoscopio polivalente para biopsias y ecografías endorrectales

Sapi Med anuncia un nuevo diseño de rectoscopio que se añade a su extensa línea de coloproctología. El nuevo rectoscopio cuenta con una pantalla de seda de doble graduación en su cara externa que permite su uso para una exploración controlada del recto, y como medio efectivo para llevar a cabo exámenes médicos más exhaustivos con instrumentos específicos.

REF.: **A.4522**

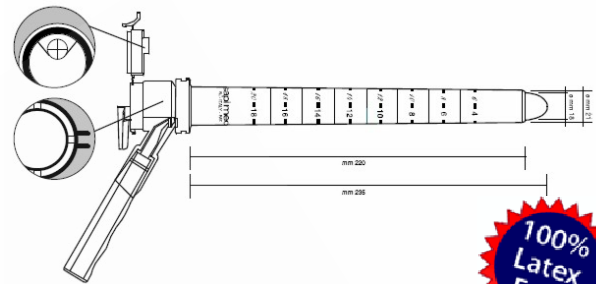

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Inserte la punta del cable de fibra óptica que parece un lápiz negro en el mango hueco del rectoscopio y conecte la otra punta al generador de luz GLF 100 para asegurar una iluminación óptima del área de examen.
2. Lubrique el MPR y el obturador con un gel inerte.
3. Introduzca gradualmente el rectoscopio en el ano del paciente; puede verificar la profundidad leyendo la pantalla de seda externa.
4. Retire el obturador y ajuste el mango con un giro en el sentido de las agujas del reloj.
5. Cierre la tapa del mango aplicando una leve presión con el pulgar en el marco negro de la lente.
6. Enganche los juegos/discos de filtros al pequeño tubo cilíndrico que se encuentra en el lado izquierdo de la tapa, e insufla aire en el recto para estirar la mucosa.
7. Puede comenzar el examen quirúrgico.

Debajo de la lente se encuentra una membrana con una cruz que marca un punto débil. Esto facilita el manejo de los fórceps para las biopsias de mucosa, al tiempo que mantiene estiradas las paredes rectales. Las dimensiones del MPR (diámetro y largo) han sido diseñadas para permitir la inserción de una sonda de ecografía endorrectal para realizar un diagnóstico exacto del ápula rectal.

Las dos pequeñas aletas que se encuentran en el lado derecho del mango de polímero están diseñadas para sujetar la llave a la sonda del rectoscopio y permite que los dos dispositivos roten juntos. La segunda pantalla de seda permite corregir la sonda durante su introducción en el recto.

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Referencia **A.4522** Unidades: **12 unidades** Esterilizado mediante: **Óxido de Etileno**

Edición Marzo/2010