



M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima



BBL SC

AGUJA de BIOPSIA DE HUESO CON sistema ANTI LUXACIÓN



Bloqueo seguro de la cánula

La aguja **BBL SC** utiliza un sistema de captura único que garantiza una muestra intacta de médula

Procedimiento:

- Quitar el mango de cierre
- Base con borde afilado en doble pico
- Medir el largo de la muestra
- Insertar la cánula con el cierre de seguridad
- Girar la aguja 360°
- Retirar la aguja lentamente rotando en y contra el sentido de las agujas del reloj
- Hacer avanzar suavemente la canula hasta que la muestra sea expulsada de la punta.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:

REFERENCIA	CALIBRE (Ga)	DIAMETRO	LONGITUD	UNIDAD DE VENTA
BBL SC 08/10	8 Ga	4 mm	10 cm	20 unidades
BBL SC 08/15	8 Ga	4 mm	15 cm	20 unidades
BBL SC 09/10	9 Ga	3,5 mm	10 cm	20 unidades
BBL SC 09/15	9 Ga	3,5 mm	15 cm	20 unidades
BBL SC 11/10	11 Ga	3 mm	10 cm	20 unidades
BBL SC 11/15	11 Ga	3 mm	15 cm	20 unidades
BBL SC 13/05	13 Ga	2,5 mm	5 cm	20 unidades
BBL SC 13/10	13 Ga	2,5 mm	10 cm	20 unidades
BBL SC 13/15	13 Ga	2,5 mm	15 cm	20 unidades

