



M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima



DILATAN® (Dilatador anal criotérmico) Rf: A 1003

El dilatador anal criotérmico **DILATAN**, se compone de un conjunto de tres medidas diferentes (**20**, **23** y **27mm**) consta de una envoltura de material plástico inerte que, interiormente, contiene un gel termoacumulador, a fin de aportar los beneficios de la termoterapia (calor) o de la crioterapia (frío) en función de las condiciones patológicas anales.

- **Estenosis** (estrechamiento) del orificio anal de origen cicatrizante o idiopática
- **Hipertono** o espasmo del esfínter con hemorroides, proctalgia esencial o grietas con eventual estreñimiento secundario.
- **Prevención** de la estenosis postoperatoria de hemorroides o fístula



El dilatador puede aplicarse caliente (máx a 50°) en el hipertono o espasmo doloroso, o frío (no inferior a 0°) en presencia de sangre anal.

En otras condiciones la temperatura del dilatador es indiferente.

Las medidas pequeña y media están indicadas en la estenosis anal oprimida por una distensión progresiva. El empleo del dilatador grande está indicado siempre en el espasmo

MODO DE EMPLEO

En la **crioterapia** se enfría el dilatador en el frigorífico o se sumerge en agua o hielo durante 10 o 15 minutos.

En la **termoterapia** se calienta el dilatador con agua corriente caliente (no superior a 50-60°), a continuación se lubrica el dilatador con crema **DILATAN** o cualquier ungüento lubricante.

Se introduce el dilatador en el orificio anal lentamente hasta su base, estando sentado en el bidet o acostado en la cama, antes o después de la defecación indistintamente.

En caso de espasmos esfinterales es aconsejable, antes de introducir el dilatador, tomar un baño templado o caliente en el bidet ya que tiene un efecto relajante en la musculatura del esfínter anal.

El dilatador debe permanecer introducido entre uno y tres minutos, extrayéndose a continuación lentamente.

Mientras el dilatador esta inserido se aconseja no levantarse ni andar.

Mientras dure el dolor se aconseja usar el dilatador dos veces al día; el tratamiento debe alargarse al menos un mes después de que hayan desaparecido las molestias.

Después de una hemorroidectomía las dilataciones deben efectuarse una o dos veces al día durante el primer mes postoperatorio y una vez cada dos o tres días en los meses sucesivos.

En la estenosis anal es necesario realizar las dilataciones diariamente durante algunos meses.

MEDIDAS:

Referencia Pedidos: A 1003 **Unidad venta: Caja de 12 conjuntos**

LIMPIEZA DEL DILATADOR

El dilatador se debe lavar con agua templada usando jabón neutro y eventualmente sumergido en una solución desinfectante durante algunas horas (betadine, citrosil, etc.)

ADVERTENCIAS

Se recomienda llevar un control medico proctológico a fin de excluir otros orígenes de los síntomas.

CREMA DILATAN Referencia pedidos: **A 3050** Unidad venta: **Caja de 50 Tubos de 50ml/tubo**
Crema a la camomila ipirica y caléndula para emplear con el dilatador anal criotérmico **DILATAN**.



☐ Calle Nelson Mandela, nº 3-5 Bajos ☐ 47013 - VALLADOLID ☐ Tef: 983 457 477 ☐ Fax: 983 457 481
☐ [Www.mrmcomercial.com](http://www.mrmcomercial.com) ☐ E-mail: mrm@mrmcomercial.com ☐ C.I.F. nº : A/47-061536