



M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima




BINASAL AIRWAY

Catálogo e Instrucciones de Uso


1. Para seleccionar el diámetro exterior adecuado del Binasal Airway, consultar la tabla de medidas que aparece en el exterior de la bolsa y es la siguiente:

Diam.Exterior (OD)	PESO APROX.
2.5 mm	1000 gr. ó menos
3.0 mm	1.000 - 1.500 gr.
3.5 mm	1.500 - 2.000 gr.
4.0 mm	2.000 gr y más


2. Para estimar la longitud de inserción, medir desde la punta de la nariz hasta la parte media del párpado inferior.

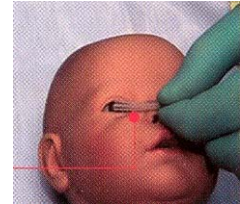

3. En la inserción, el ángulo del bisel debe situarse hacia abajo. En esta posición, introducir el Binasal Airway hasta la profundidad previamente estimada

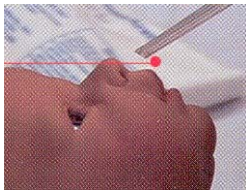

4. Después de colocar el NeoBar, asegurar el Binasal Airway en su sitio arrollándolo con cinta a la plataforma del NeoBAR.

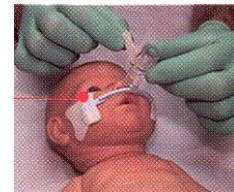

Nota:

Hay que tener en cuenta, que el NeoBAR se coloca por encima del labio superior cuando se usa con el Binasal Airway.

El Binasal Airway no causa ninguna presión al septum o a la nariz. ¡NO NARIZ DE CERDITO!

Como alternativa, tener en cuenta que algunos servicios prefieren usar un modelo mayor de longitud, ya que la medida extra permite el movimiento del circuito de ventilación.

5. Programar la frecuencia de limpieza y aspiración del Binasal Airway, de acuerdo al protocolo del Hospital. Sacar el tubito izquierdo del Binasal Airway, limpiar con solución salina, instilar varias gotas del solución salina en el orificio de la nariz y succionar. Reinsertar el tubito y repetir el proceso con el tubito del lado derecho.



M.R.M. COMERCIAL
Sociedad ANÓNIMA
NEOTECH
Products, Inc.

Edición: Abril 2009