



**M.R.M. COMERCIAL**  
Sociedad Anónima



## NeoBAR

### Catálogo e Instrucciones de Uso

1. Después de que el paciente es intubado, seleccionar el tamaño adecuado probando sobre la cara. La zona adhesiva debe llegar cerca del hueso del oído del bebe. La zona adhesiva colocada sobre la mejilla, podría permitir el movimiento del tubo ET.

Ref.	Medida	Color	Peso en gramos
N709	MINI	PÚRPURA	800 grms o menos
N710	ULTRA	AMARILLO	800-1000 grms
N711	MICRO	BLANCO	1000-1500 grms
N712	PEQUEÑA	VERDE	1500-2200 grms
N713	GRANDE	AZUL	+ 2200 grms
N714	MACRO	MELOCOTÓN	Paciente pediátrico

2. Asegurar que la zona este limpia y seca según el protocolo del hospital.

3. Retirar la superficie plástica transparente en contacto con el adhesivo. Situar ambas zonas adhesivas sobre el hueso auditivo, y sujetar en el sitio al **menos 30 segundos**



4. Para asegurar el tubo ET al NEOBAR enrollar la cinta al menos una vuelta completa alrededor del tubo ET, y luego continuar enrollando alrededor de ambos, tubo y plataforma.




■ Notar que el NEOBAR se posiciona perpendicularmente al centro de la boca con el tubo ET debajo de la plataforma.

■ De esta manera, el tubo ET no estará en contacto con el reborde dental y le ayuda a desviarlo hacia abajo y fuera del paladar.


■ Por favor, note que la barra posicionada fuera de la boca, esta se abre para aspiración oral, no hay contacto de la piel con la cinta y no será afectada por cualquier secreción oral.

5. Para retirarlo normalmente, tirar de forma suave de las zonas adhesivas mientras se van humedeciendo con un bastoncillo mojado en agua.

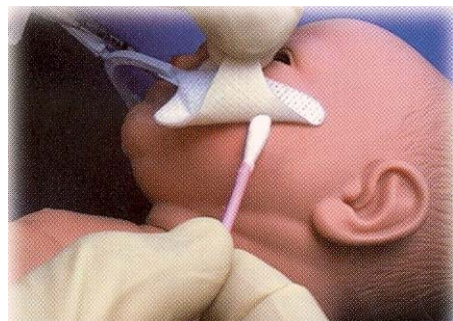

6. Cuando sea urgente retirar NEOBAR, cortar la fina unión de plástico entre la barra y la zona adhesiva de ambos lados. Retirar la barra y el tubo ET simultáneamente.

Las zonas adhesivas serán retiradas mas tarde.

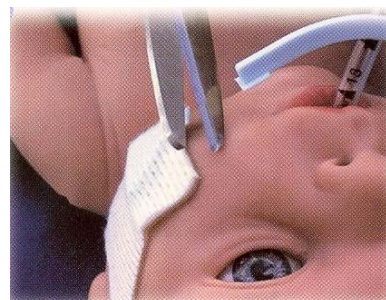

**NEOTECH**  
Products, Inc.