



M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima



NeoBRIDGE

Catálogo e Instrucciones de Uso

PREPARACIÓN

Limpie y seque la piel de acuerdo con el protocolo del hospital. Es importante tener la piel limpia y seca para una mejor adhesión del producto. La humedad, los aceites o lociones afectan negativamente la adherencia del Hidrocoloide Neobond No se requiere ninguna otra preparación especial de la piel.

NO UTILICE ALCOHOL

APLICACIÓN

Elija apropiadamente la medida:

NEOTECH
Products, Inc.

PESO APROX. DEL BEBE	TALLA NeoBRIDGE	REFERENCIA
800 gramos o menos	micro	N700
800-1200 gramos	pequeño	N701
1200-2200 gramos	grande	N702


1. Retirar la lámina transparente posterior de las base hidrocoloide, deslizar la base alrededor del catéter, pegar sobre la piel

Nota: sujete suavemente el lugar por lo menos 30 segundos para conseguir la adherencia apropiada


Verifique que la parte mas ancha de la base está situada hacia la cabeza del niño.




2. Suavemente retirar la lámina transparente superior del ala derecha y levantándola pegue a ella el catéter.

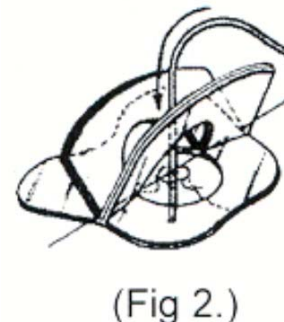

3. Repita el mismo proceso con el ala restante y enlace en medio el catéter que quedara firmemente sujeto al apretar con los dedos., según se muestra la figura.

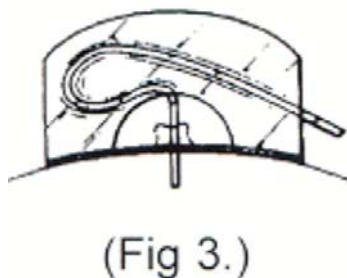

4. Si está utilizando dos catéteres umbilicales, sitúe cada catéter a un lado de la alas flexibles del NeoBRIDGE y cierre las juntas.

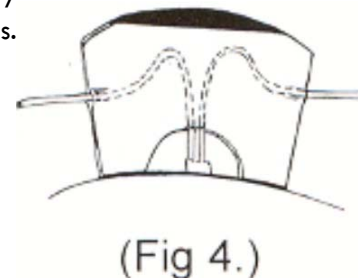

Para retirar un catéter basta con separar las alas, según se explica en el paso 5 y quitar el catéter: Pegaremos nuevamente las alas una vez realizada la operación.

RETIRADA o REPOSICIONAMIENTO

5. Para retirar el catéter, suavemente tirar de ambas aletas ayudándose con las tiritas verdes existentes en su borde. Estas tiritas verdes permiten abrir y cerrar repetidamente si hubiera que reajustar la posición del catéter.

6. Para retirar la base hidrocoloide adhesiva del bebe, tirar de forma suave de la misma, mientras se va humedeciendo con un bastoncillo mojado en agua.