



M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima



BoCeMix

MEZCLADOR DE CEMENTO ACRÍLICO

(EQUIPO DE UN SOLO USO)

Mezclador de cuchillas, con inyección de pistón, para cemento acrílico de ortopedia. Funcionamiento mediante vacío permanente

Controles antes del empleo:

1. Cerciorarse de que la fecha de caducidad del aparato no haya vencido.
2. Cerciorarse de que el embalaje y la envoltura están íntegros, no mojados o abiertos o alterados.
3. Controlar que el aparato no esté roto o defectuoso o que parte de las piezas no presenten daños o lesiones y que no esté sucio o contaminado.
4. En uno o cualquiera de los casos anteriores, el aparato deberá ser desechado.


Después del uso:

- 1 Eliminar todo el aparato, según las Normas aplicables en la Institución.

Empleo:



1. Mezclador de cuchillas con inyección de pistón para cemento acrílico para ortopedia, funcionamiento con vacío permanente.

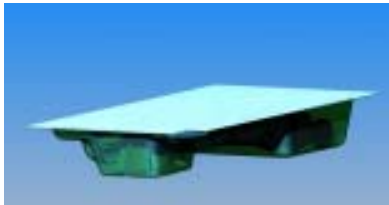

2. Una vez abierto el primer sobre, extraer el contenedor interior sellado, y apoyarlo en una superficie estéril para abrirlo.



3. Extraer a todos los elementos del BoCeMix, el contenedor puede ser utilizado para desechar las distintas partes del aparato y eliminarlos según las Normativas aplicables. Revisar todos los elementos.



4. Conectar el tubo a el vacío con el conector adecuado sobre la tapadera del BoCeMiX y, la otra extremidad, al embudo del sistema de aspiración existente en la Sala de Operaciones.



5. Controlar que el grifo situado en la base del cilindro contenedor transparente esté cerrado y posicionar con cuidado y adecuadamente el cilindro sobre el soporte, (el cilindro queda fijado al soporte efectuando un pequeña rotación). Inserte el embudo, suministrado, en el contenedor y, por este, introducir primero el polvo.



6. Introducir luego el líquido, en todo caso, siempre siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante del cemento acrílico que se utiliza. NB: BoCeMix tiene capacidad para 2 dosis de cemento, (o hasta 160 cc. = unos 200 gr. Producto).

