

# MAKA-MED

## SONDA PARA HISTEROSALPINGOGRAFIA

### VENTAJAS

Su forma cónica facilita el cierre del orificio externo y permite introducirse en el cuello uterino sin deformarlo.

La parte cilíndrica, especialmente diseñada, se presenta de tipo medio para facilitar el sondaje de cuellos difíciles.

Puede seccionarse y acortarse en casos determinados.

Es de un solo uso, con lo que se asegura la asepsia.

### APLICACION

Se unen por presión, sonda cánula y jeringuilla, con unos 20 cms. de contraste. Se procede a purgar el aire contenido en las dos primeras.

Introducir la sonda a través del orificio cervical externo, en cuello uterino (O. C. E.).

Presionar con la parte cónica para facilitar la obturación completa del O. C. E.

Fijar adicionalmente con una pinza de garfio en el hocico de tenos, para asegurar el hermetismo del O. C. E. y para que, mediante sujeción con una sola mano de pinza y cánula, se pueda efectuar la tracción que corrija la posible anteversión uterina.


Finalmente se procede a la obtención de radiografías en distintas fases de repleción, y por último se comprueba el paso a cavidad peritoneal.

### Información para Pedidos

Referencia: **10191**

**Caja de 50 unidades**

**SIN  
LATEX**

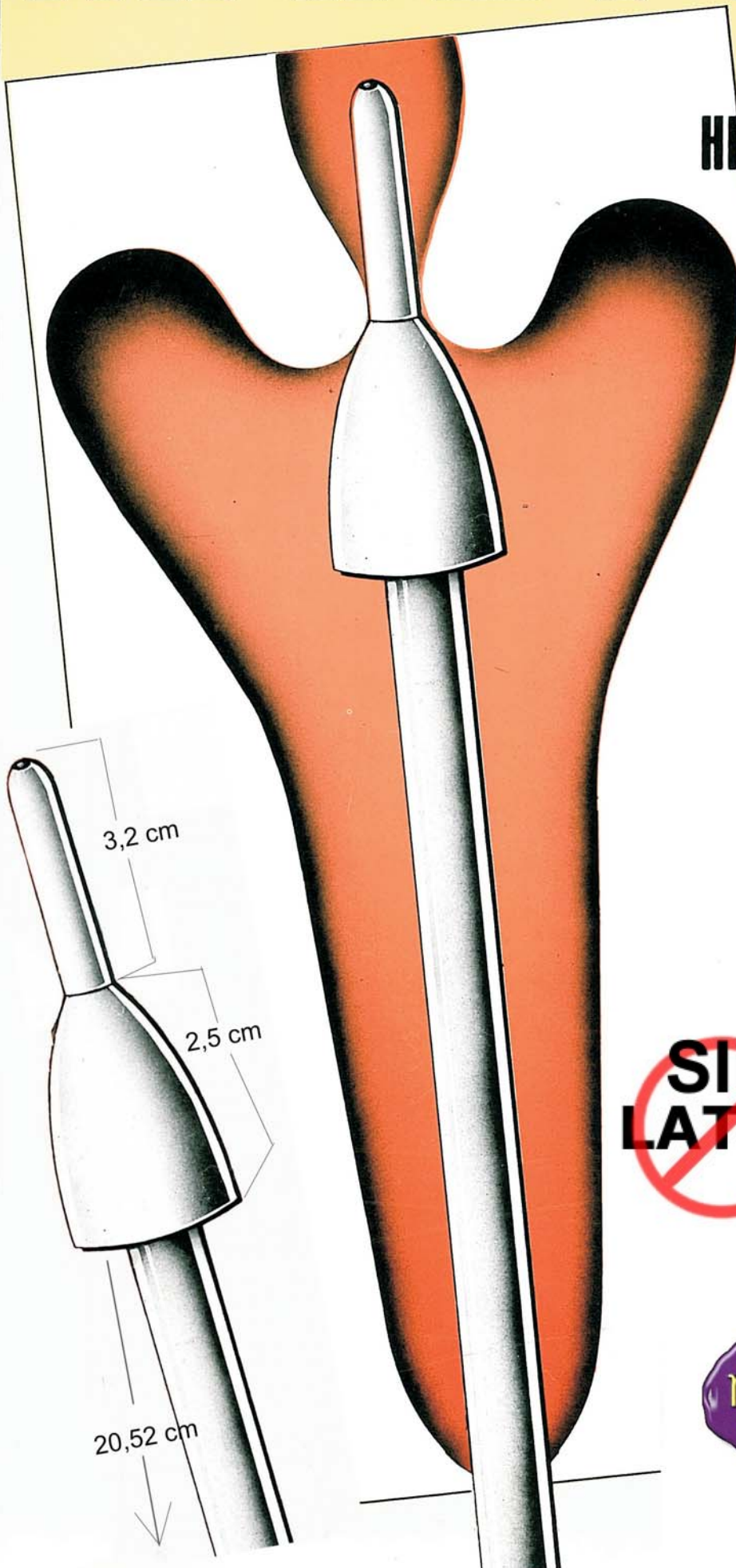

**M.R.M. COMERCIAL**  
S.A.

Calle Nelson Mandela, nº 3 bajo  
Tef: 983 457 477 Fax: 983 457 481  
47013 - VALLADOLID (ESPAÑA)  
www.mrmcomercial.com  
E-mail: mrm@mrmcomercial.com