


Conector I. V. Chalfont para obstetricia

El Conector I. V. Chalton de Mediplus es la solución moderna para obstetricia. Está diseñado específicamente para la administración rutinaria de Sintocinón (u otros agentes inductores), la válvula de gravedad I. V. elimina la posibilidad de distrés fetal causado por el bolo de la droga

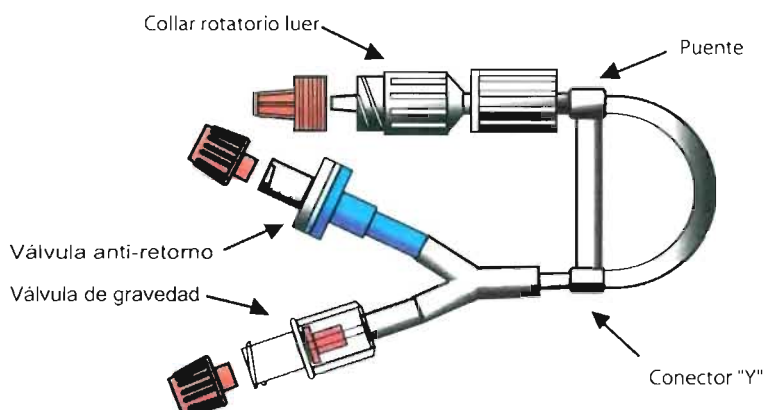

Ventajas específicas de Mediplus

Característica

Ventaja

- | | |
|--|--|
| ● Favorece la administración rutinaria del Sintocinón (u otro agente inductor) y el goteo libre I. V. o mediante otra bomba de jeringa | ● Abarca todas las necesidades rutinarias en obstetricia |
| ● El sistema de puente y curva evita la oclusión/pinzamiento del tubo | ● Evita la interrupción del flujo y el posible distrés fetal |
| ● Pequeño; cabe bien en la palma de la mano | ● Muy fácil de fijar y muy difícil que se desprenda |
| ● Válvula de gravedad para infusión intra venosa | ● Evita el reflujo de la droga a la línea de fluido y la posibilidad de formar bolo que cause distrés fetal |
| ● Válvula anti-retorno de alta tecnología (20mB-velocidad de flujo mínima 65ml/min) | ● Válvulas de máxima garantía empleadas en muchos productos I. V. de Mediplus de uso prolongado |
| ● Tapones ROJOS en todas las conexiones | ● Sigue las indicaciones del Departamento de Sanidad emanadas de <i>Project Orcadian</i> en el que se exponen incidentes debidos a tapones en los circuitos respiratorios de algunos pacientes |

El estudio "Protecting the breathing circuit in anaesthesia", que también relaciona otras instrucciones para anestesia puede adquirirse a través del Department of Health Publications, email: doh@prolog.uk.com, o consultado en la website del Department of Health: www.dh.gov.uk

Código

Descripción


Cantidad

0146507

Conector I.V.Chalfont para Obstetricia

50

Conector I. V. Chalfont para obstetricia

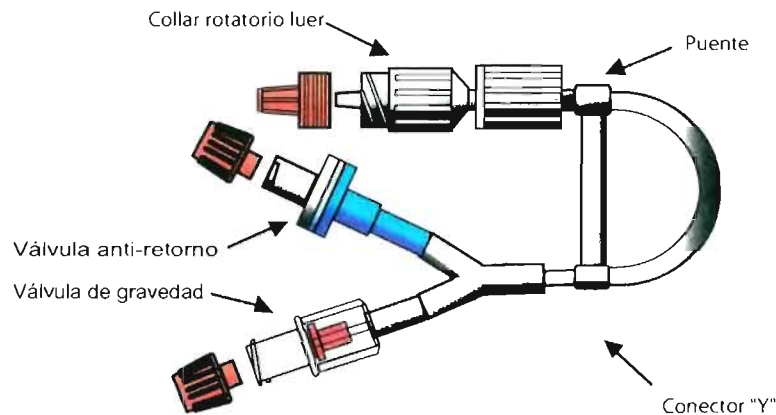

INSTRUCCIONES DE EMPLEO



! LEA CON ATENCIÓN

Siguiendo estrictamente las normas de asepsia, quite el set de su envoltorio y colóquelo sobre una superficie estéril (para las conexiones siga las normas de asepsia del hospital).

Quite los tapones proximales **ROJOS** y guárdelos alejados del circuito respiratorio del paciente.

Conecte la línea intravenosa adecuada a cada uno de los conectores proximales, asegurando una fuerte conexión. Cuando la 1/2 de las líneas estén conectadas quite el tapón **ROJO** distal i encebe cada uno con una jeringa apropiada o emplee las opciones "purgue" (purge) o "encebe" (prime) de las bombas de jeringa (o control de goteo en las líneas) hasta que éstas estén totalmente cebadas.

Cuando vea que la(s) droga(s) aparece(n) en el punto distal, conecte a la cánula.

¡IMPORTANTE! Asegúrese de que la línea IV por gravedad está conectada **solamente** a la línea de fluido IV como está normalizado en la infusión IV por gravedad. Si el goteo se conecta a una válvula de no retorno **debe emplearse** un brazalete de presión, (smart).

Precauciones

- De un sólo uso
- Estéril mientras no se abra o rompa el envoltorio
- **Atención:** la Ley Federal (USA) restringe la venta de este dispositivo a los médicos o bajo su solicitud.

Nota La idoneidad del empleo de este dispositivo médico la debe determinar el usuario Mediplus (BMB) no se hace responsable decualquier perjuicio incidental o consecuencial.



M.R.M. COMERCIAL
S.A.

Calle Nelson Mandela, nº 3 bajo
Tef: 983 457 477 Fax:983 457 481
47013 - VALLADOLID (ESPAÑA)
www.mrmcomercial.com
E-mail: mrm@mrmcomercial.com