




M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima



ANTROSOND Dr. C. Antropoli

SONDA ESTÉRIL DESECHABLE PARA EL DRENAJE DE FÍSTULAS ANALES

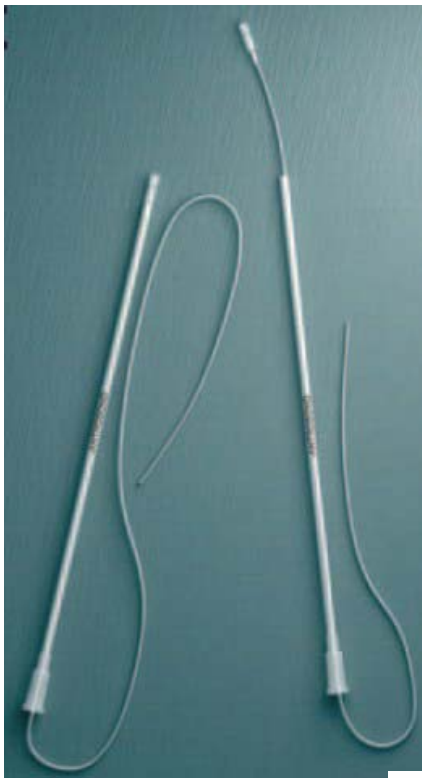


ANTROSOND es la respuesta moderna a la búsqueda de perfeccionar una técnica muy generalizada y ampliamente apoyada por sus resultados exitosos en el tratamiento de fístulas, en particular las perianales.

Se trata de un dispositivo estéril y desechable diseñado para explorar fístulas y, simultáneamente, introducir purgas de silicona para la tracción lenta del esfínter. Esta acción combinada reduce el tiempo de intervención, permite que el drenaje se posicione con precisión, y elimina el riesgo de rotura del filamento que se produce por la tensión de arrastre inevitable en los sistemas tradicionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANTROSOND consiste en un tubo flexible transparente de 160 mm de largo, con un diámetro externo de 2.6 mm; dentro contiene un filamento hipoalergénico de silicona biomédica de 290 mm (Mono Drain). Una extremidad del tubo termina en un Luer Lock al que se puede conectar una jeringa para inyectar solución salina, si fuera necesario. Un extremo del torniquete tiene una tapa rígida ovalada que se inserta en el tubo para hacer un dispositivo integral.

REF: A.5550

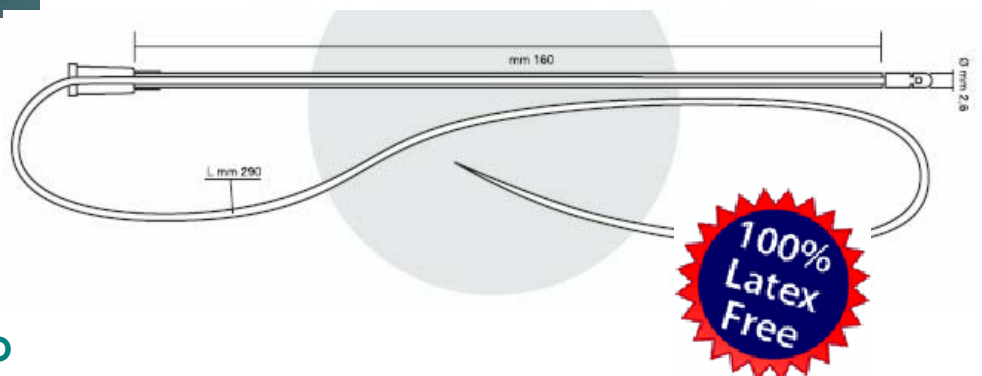

INSTRUCCIONES DE USO

Una vez identificada la fístula, **ANTROSOND** se utiliza como una sonda normal: Inserte el extremo rígido ovalado en la fisura. Proceda lentamente por todo el tracto y, una vez cerca del agujero de entrada, mantenga el extremo del filamento de silicona con una mano y con la otra deslice el tubo hacia afuera.

El torniquete ha quedado correctamente insertado y posicionado para un drenaje óptimo. Después de anudar las dos extremidades puede proceder aplicar tracción a los músculos.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Referencia **A.5550** Esterilizado por Oxido de Etileno Unidades por caja: **10 unidades**

Edición Marzo/2010